




Breves instrucciones para el autotest

Producto: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Fabricante: Roche

Preparación

Para la realización del test deberá contar con los siguientes elementos:

Diese Komponenten sollten zur Testdurchführung vorliegen:

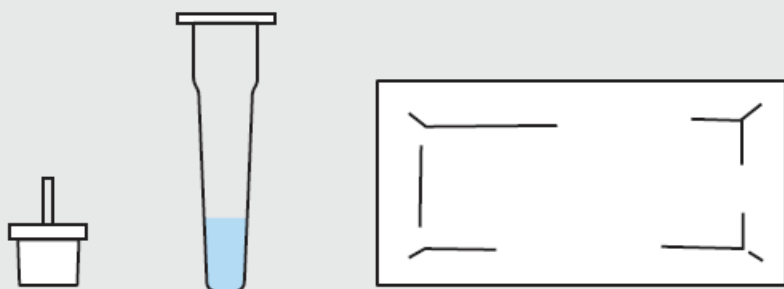

Zur Probennahme den separat erhaltenen Nasen-Abstrichtupfer verwenden.



Utilice el bastoncillo suministrado para recoger la muestra de la nariz.

Toma de la muestra (temperatura ambiente)


1 Kopf leicht nach hinten neigen, Nasen-Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher langsam ca. 2 cm parallel zum Gaumen einführen, dabei keinen Druck ausüben. Jeweils viermal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen (ca. 15 Sekunden)



1

Incline la cabeza ligeramente hacia atrás, introduzca lentamente el bastoncillo en ambas fosas nasales, unos 2 cm en cada una de ellas, paralelamente al paladar y sin ejercer presión. Girar cuatro veces en cada fosa untándolo con mucosa nasal (aprox. 15 segundos).

Tratamiento de la muestra

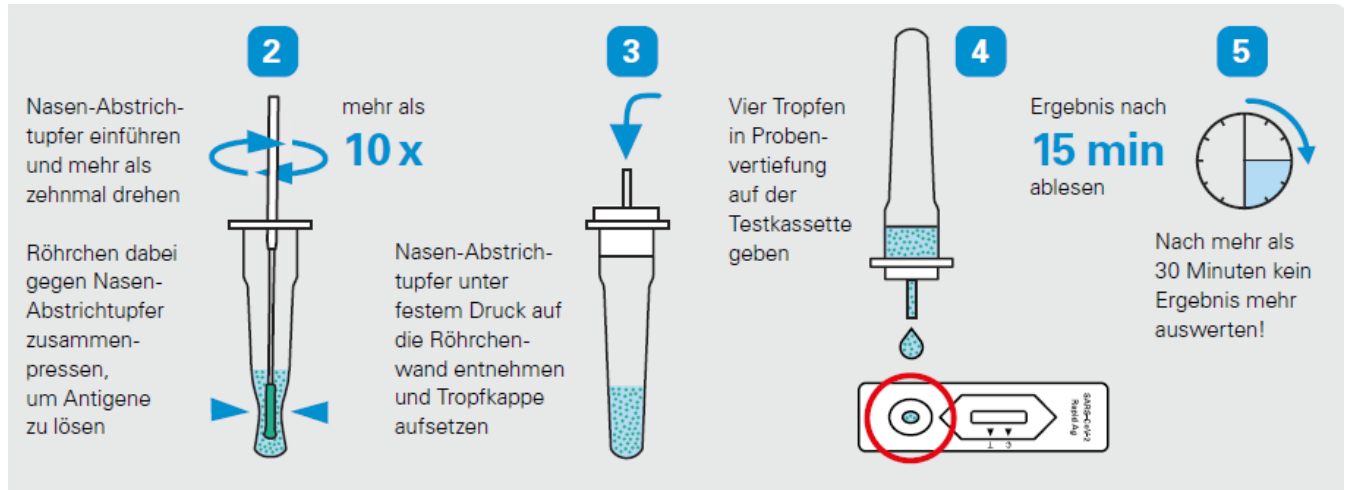

2

Introducir el bastoncillo en el tubo y girarlo más de diez veces

Apretar el tubo contra el bastoncillo para que los antígenos se desprendan

3

Retirar el bastoncillo presionando firmemente contra la pared del tubo y colocar el capuchón de goteo de nuevo en el tubo.

4


Depositar cuatro gotas en el cuenco de valoración

5


Lea el resultado **pasados 15 minutos**

¡No evalúe el resultado si han transcurrido más de 30 minutos!

Evaluación de los resultados

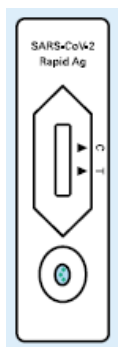

Cualquier color en la línea de test (T) debe considerarse positivo.

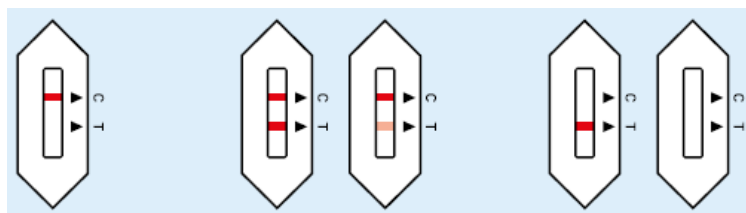

Negativo Línea de control coloreada (C)	Positivo Línea de control (C) y línea de prueba (T) coloreadas	Inválido/poco claro Sin color en la línea de control (C)	Deseche en la basura doméstica los kits de test usados bien cerrados
Los escolares pueden continuar en la escuela	Se aísla a los escolares , que han de ser recogidos en la escuela o enviados a casa. Se debe contactar con su Centro de salud y repetir la prueba con un test PCR.	Repita el test con material nuevo	

Respuestas a "preguntas frecuentes" (FAQ)

¿Qué son los autotest de Covid?

Los llamados test rápidos de antígenos no son sólo rápidos, sino también fácil de realizar (véanse las breves instrucciones del autotest). El bastoncillo debe introducirse unos 2 cm en cada fosa nasal. El resultado se obtiene una vez pasados sólo 15 minutos.

¿Qué hacer en caso de un resultado "positivo"?

Si el autotest da un resultado positivo, el escolar afectado debe ser aislado de otras personas y -si es posible- recogido por sus padres o tutores o enviado a casa. El padre o tutor debe entonces informar inmediatamente a su Centro de salud sobre el resultado. Dado que también es posible que el autotest arroje un resultado "falso positivo", el Centro de salud siempre ordenará una prueba de PCR para verificar el resultado del test. Sólo si el test PCR también es positivo, existe realmente una infección probada del SARS-CoV-2.

Si el resultado del test es negativo, ¿por qué hay que seguir respetando las normas anti Covid?

Los test rápidos son sólo un componente más. Junto con las otras medidas de higiene establecidas, la seguridad en la escuela aumenta.

Entre ellas no hay que olvidar:

- mantener la distancia
- llevar mascarilla sobre boca y nariz
- lavarse las manos
- estornudar y toser en el codo
- ventilar regularmente

¿Cómo se almacenan y desechan los autotest?

Los test deben conservarse a 2-30°C y nunca congelarse. Los residuos de los test usados pueden eliminarse en una bolsa de basura a prueba de roturas y fugas junto con otros residuos domésticos.

En caso de síntomas típicos de Covid: ¿se debe realizar el autotest?

No. En caso de sospecha de infección, las personas afectadas deben ponerse en contacto con su médico de cabecera o con su Centro de salud. No está permitida la asistencia a la escuela.

Centro de salud y test PCR adicional

Un resultado positivo del test debe comunicarse inmediatamente a su Centro de salud. Allí también recibirá más información sobre cómo comprobar el resultado de la prueba mediante un test PCR.

Aquí encontrará un plano de los [Centros de salud locales](#):



<https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/>

Más información sobre el autotest de Covid

- [Vídeo explicativo](#)
- [Instrucciones en diferentes idiomas](#)
- [Más "preguntas frecuentes" \(FAQ\) y respuestas](#)



<https://www.km.bayern.de/selbsttests>



<https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq>