




Notice succincte pour un autotest

Produit : Test de dépistage CLINITEST® Rapide COVID-19 Antigénique
Fabricant : Siemens Healthineers


Préparation

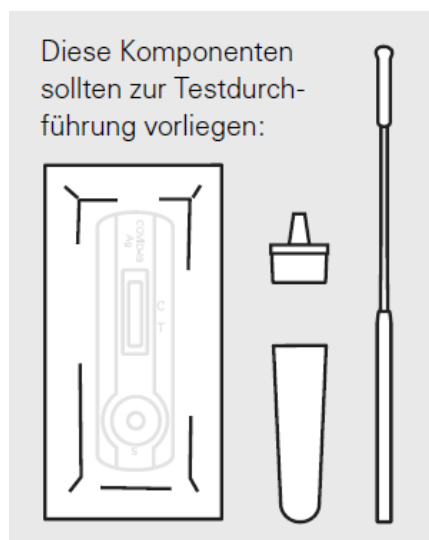

Ces composants doivent être disponibles pour réaliser le test :


Premières étapes

1

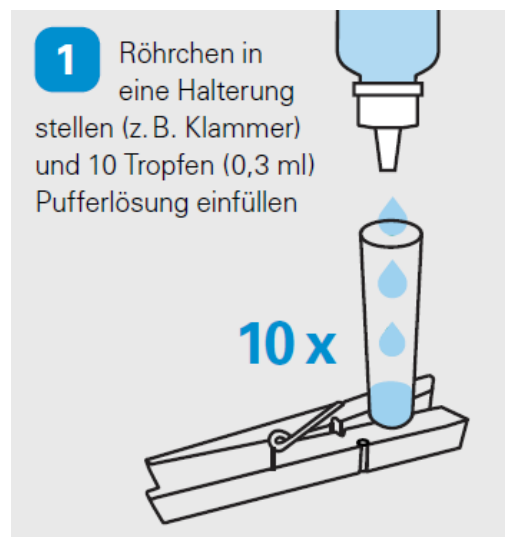

Placer le tube dans un fixation (p. ex. une pince) et remplir de 10 gouttelettes (0,3 ml) de solution tampon


Prise d'échantillon (par une température ambiante)

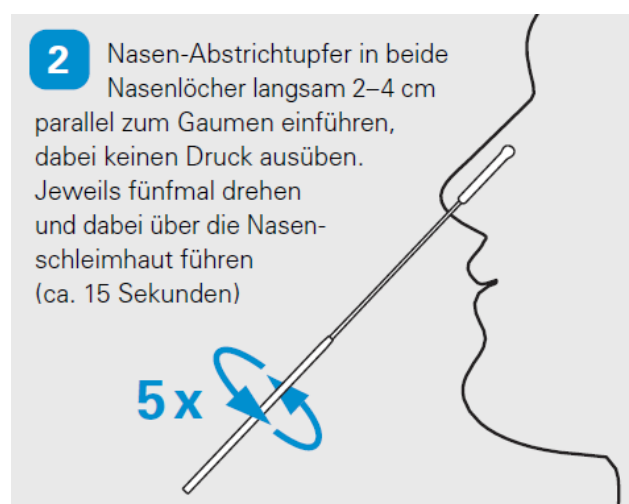

2

Introduire délicatement l'applicateur-tamponneur nasal dans les deux narines à une profondeur d'env. 2 à 4 cm en parallèle au palais, sans exercer de pression. Tourner cinq fois à chaque fois en passant sur les muqueuses nasales (pendant env. 15 secondes)

Traitement de l'échantillon

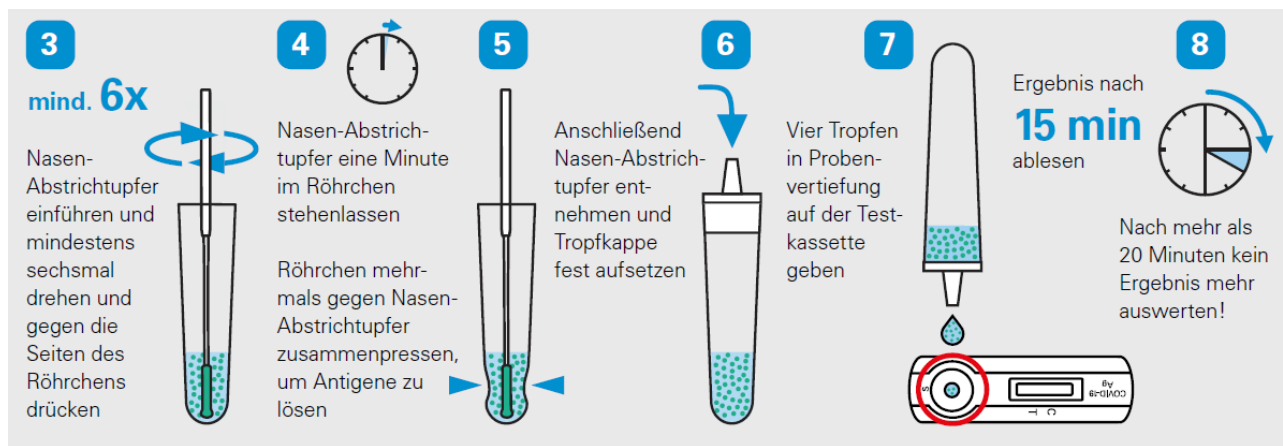

3
Introduire l'applicateur-tamponneur nasal et tourner au moins six fois en appuyant sur les parois du tube

4
Laisser reposer l'applicateur-tamponneur nasal dans le tube pendant une minute

5
Comprimer plusieurs fois le tube contre l'applicateur-tamponneur nasal afin d'en libérer les antigènes


6
Par la suite, retirer l'applicateur-tamponneur nasal tout en exerçant une pression ferme sur la paroi arrière du tube et y placer le bouchon antigoutte

7
Placer quatre gouttes dans la cavité prévue pour l'échantillon dans la cassette-test


8
Relever le résultat après **15 minutes**

Ne plus analyser de résultat, passé les 20 minutes !

Analyse des résultats

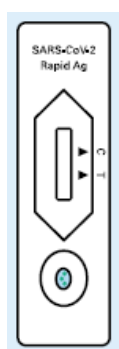

Toute nuance de coloration de la ligne test (T) doit être interprétée comme positive

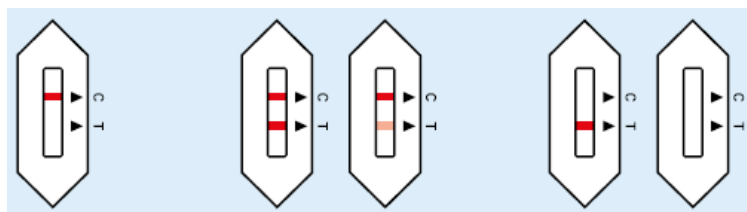

| Négatif | Positif | Invalide/flou | Éliminer les kits de test utilisés emballés de manière étanche dans les déchets ménagers |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Ligne de contrôle colorée (C) | Lignes de contrôle (C) et de test (T) colorées | Aucune ligne de contrôle (C) | |
| Les élèves peuvent rester à l'école | Les élèves sont isolé(e)s et cherché(e)s par l'école voire renvoyé(e)s à la maison ; une prise de contact avec les services sanitaires locaux (Gesundheitsamt) ainsi qu'un test PCR sont nécessaires | Renouveler le test avec du nouveau matériel | |

Réponses à la «Foire aux Questions» (FAQ)

Que sont les autotests Covid-19 ?

Les tests dits antigéniques rapides sont d'utilisation simple et rapide (cf. notice succincte pour un autotest). L'applicateur-tamponneur nasal doit être introduit dans chaque narine à une profondeur d'env. 2 à 4 cm. Le résultat s'affiche après 15 minutes déjà.

Que faire en cas de résultat « positif » ?

Lorsque l'autotest affiche un résultat positif, l'élève concerné(e) doit être isolé(e) de toute autre personne et - dans la mesure du possible - cherché(e) par une personne investie de l'autorité parentale ou être renvoyé(e) à la maison. Ensuite, les personnes investies de l'autorité parentale doivent informer les services sanitaires locaux du résultat immédiatement. Étant donné qu'il est également possible que l'autotest affiche un résultat « faussement positif », les services sanitaires locaux exigeront toujours un test PCR pour vérifier le résultat. C'est seulement lorsque le test PCR est également positif que l'infection au SARS-CoV-2 est effectivement confirmée.

Pourquoi faut-il respecter les gestes barrières même en présence d'un résultat négatif ?

Les tests rapides ne représentent qu'un seul élément. Combinés avec les autres mesures d'hygiène en vigueur, ils améliorent la sécurité à l'école.

En font partie :

- la distanciation sociale
- porter un masque couvrant la bouche et le nez
- se laver les mains
- tousser et éternuer dans le coude
- aérer à des intervalles réguliers

Comment stocker et éliminer les autotests ?

Il convient de stocker les tests à des températures de 2 à 30 °C, sans les congeler. Les tests utilisés s'éliminent avec d'autres déchets ménagers dans des sacs à ordures étanches et indéchirables.

En cas de symptômes typiques pour le Covid-19 : Faut-il procéder quand même à l'autotest ?

Non. En cas de soupçon précis d'une infection par le Covid-19, les personnes concernées s'adressent à leur médecin traitant ou aux services sanitaires compétents. Il est interdit de se rendre à l'école.

Services sanitaires et test PCR

Tout résultat positif doit immédiatement être signalé aux services sanitaires locaux. Ces services vous fournissent de plus amples informations sur la vérification du résultat par un test PCR.

Pour une liste des [services sanitaires](https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/) locaux, cliquez ici :



<https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/>

Informations complémentaires sur les autotests Covid-19

- [Vidéo d'explications](#)
- [Instructions en plusieurs langues](#)
- [«Foire aux Questions» \(FAQ\) et réponses complémentaires](#)



<https://www.km.bayern.de/selbsttests>



<https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq>