




Breves instrucciones para el autotest

Producto: CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test
Fabricante: Siemens Healthineers


Preparación

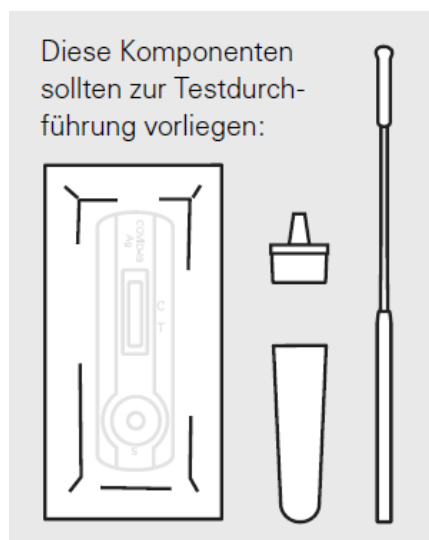

Para la realización del test deberá contar con los siguientes elementos:


Primeros pasos

1

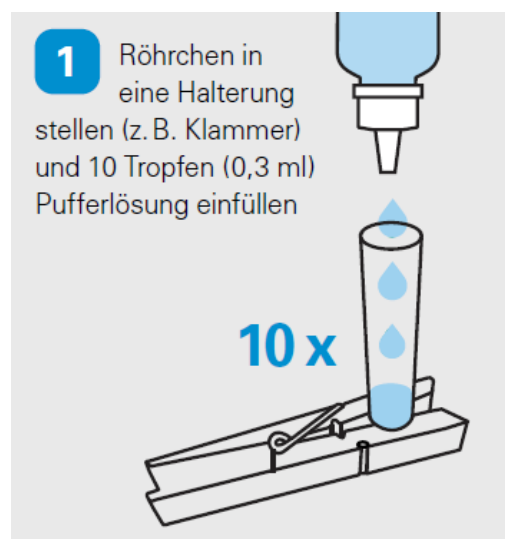

Colocar el tubo en un soporte (por ejemplo, una pinza) y añadir 10 gotas (0,3 ml) de solución tampón.

Toma de la muestra (temperatura ambiente)

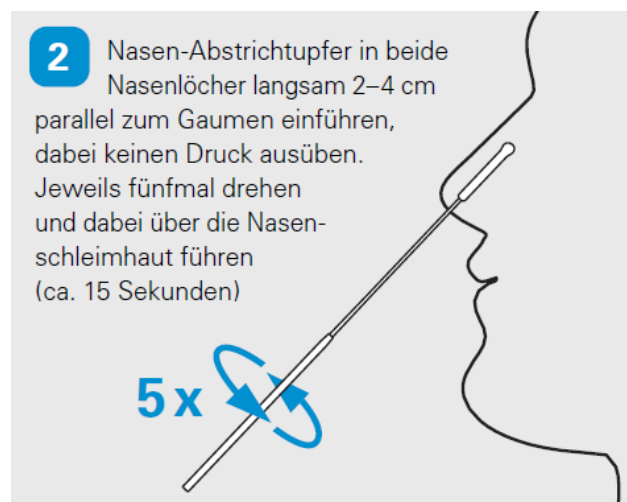

2

Introducir lentamente el bastoncillo en ambas fosas nasales, unos 2 cm en cada una de ellas, paralelamente al paladar, sin ejercer presión. Girar cinco veces pasándolo con mucosa nasal (aprox. 15 segundos).

Tratamiento de la muestra



3

Introducir el bastoncillo y girarlo al menos seis veces, apretándolo contra las paredes del tubo

4

Dejar el bastoncillo con la muestra un minuto en el tubo

5

Apretar el tubo varias veces contra el bastoncillo para que los antígenos se desprendan

6

A continuación, retirar el bastoncillo mientras aprieta firmemente las paredes del tubo, y colocar el capuchón de goteo de nuevo en el tubo

7


Depositar cuatro gotas en el cuenco de valoración

8

Lea el resultado **pasados 15 minutos**

¡No evalúe el resultado si han transcurrido más de 20 minutos!

Evaluación de los resultados

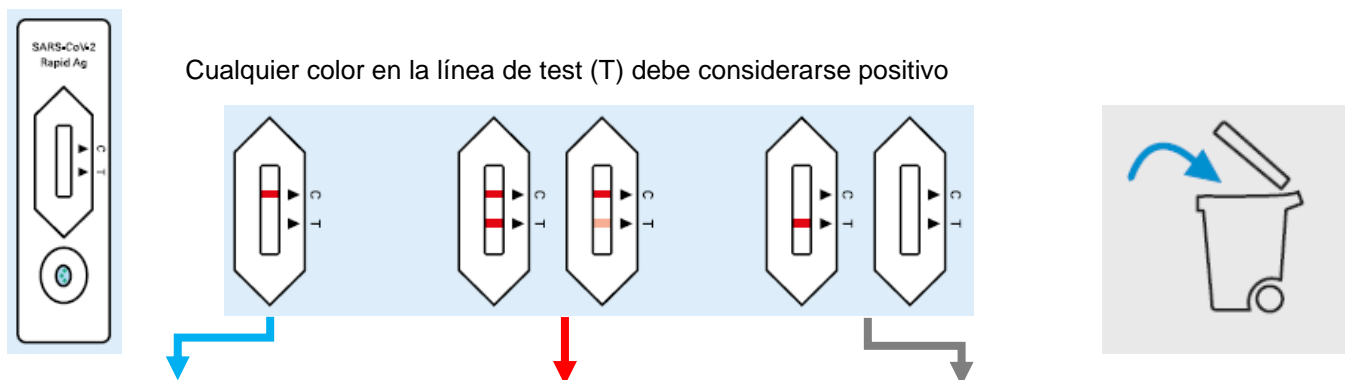

Negativo	Positivo	Inválido/poco claro	Deseche en la basura doméstica los kits de test usados bien cerrados
Línea de control coloreada (C)	Línea de control (C) y línea de prueba (T) coloreadas	Sin color en la línea de control (C)	
Los escolares pueden continuar en la escuela	Se aísla a los escolares, que han de ser recogidos en la escuela o enviados a casa. Se debe ponerse en contacto con su Centro de salud para repetir la prueba con un test PCR.	Repetir el test con material nuevo	

Respuestas a "preguntas frecuentes" (FAQ)

¿Qué son los autotest de Covid?

Los llamados test rápidos de antígenos no solo son rápidos, sino también fácil de realizar (véanse las breves instrucciones del autotest). El bastoncillo debe introducirse de 2 a 4 cm en cada fosa nasal. El resultado se obtiene una vez pasados sólo 15 minutos.

¿Qué hacer en caso de un resultado "positivo"?

Si el autotest da un resultado positivo, el escolar afectado debe ser aislado de otras personas y -si es posible- recogido por sus padres o tutores o enviado a casa. El padre o tutor debe entonces informar inmediatamente a su Centro de salud sobre el resultado. Dado que también es posible que el autotest arroje un resultado "falso positivo", el Centro de salud siempre ordenará una prueba de PCR para verificar el resultado del test. Sólo cuando el test PCR también es positivo, existe realmente una infección probada del SARS-CoV-2.

Si el resultado del test es negativo, ¿por qué hay que seguir respetando las normas anti Covid?

Los test rápidos son sólo un componente más. Junto con las otras medidas de higiene establecidas, la seguridad en la escuela aumenta.

Entre ellas no hay que olvidar:

- mantener la distancia
- llevar mascarilla sobre boca y nariz
- lavarse las manos
- estornudar y toser en el codo
- ventilar regularmente

¿Cómo se almacenan y desechan los autotest?

Los test deben conservarse a 2-30°C y nunca congelarse. Los residuos de los test usados pueden eliminarse en una bolsa de basura a prueba de roturas y fugas junto con otros residuos domésticos.

En caso de síntomas típicos de Covid: ¿se debe realizar el autotest?

No. En caso de sospecha de infección, las personas afectadas deben ponerse en contacto con su médico de cabecera o con su Centro de salud. No está permitida la asistencia a la escuela.

Centro de salud y test PCR adicional

Un resultado positivo del test debe comunicarse inmediatamente a su Centro de salud. Allí también recibirá más información sobre cómo comprobar el resultado de la prueba mediante un test PCR.

Aquí encontrará un plano de los [Centros de salud locales](#):



<https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/>

Más información sobre el autotest de Covid

- [Video explicativo](#)
- [Instrucciones en diferentes idiomas](#)
- [Más "preguntas frecuentes" \(FAQ\) y respuestas](#)



<https://www.km.bayern.de/selbsttests>



<https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq>