



Stručný návod na provedení rychlotestu

Výrobek: CLINITEST® Antigenní rychlotest COVID-19
Výrobce: Siemens Healthineers


Příprava



K provedení testu musí souprava obsahovat tyto komponenty:


Počáteční úkony

1

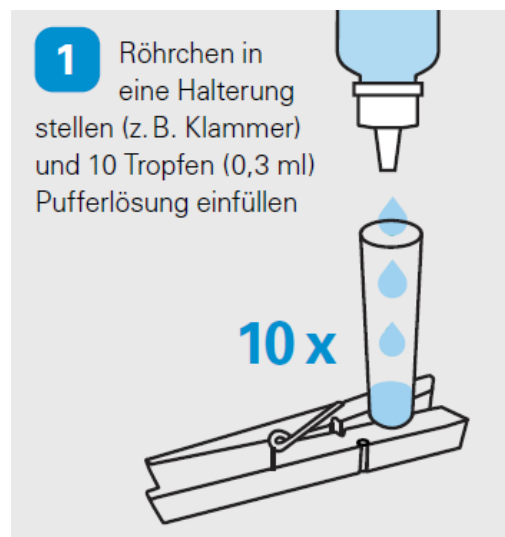

Zkumavku upevnit v držáku (např. kolíček na prádlo) a do ní nakapat 10 kapek (0,3 ml) extrakčního pufru


Provedení výtěru (při pokojové teplotě)

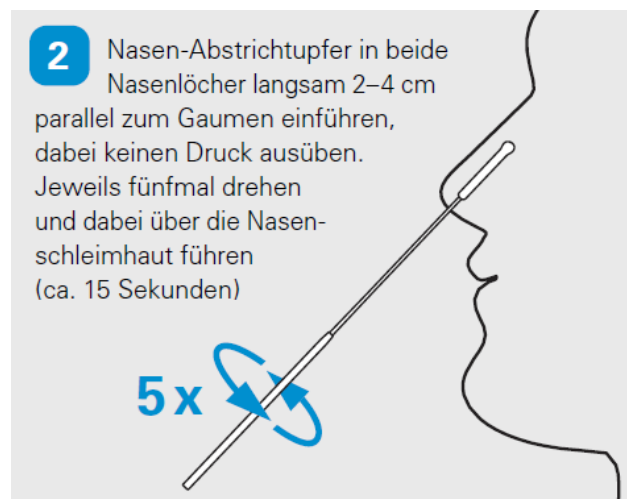

2

Tyčinku s tampónem zasuňte po sobě pomalu do obou nosních dírce 2-4 cm hluboko paralelně s patrem ústní dutiny, provádějte bez tlaku. V každé nosní dírce otáčejte tyčinkou pětkrát, přitom se tampónem dotýkejte nosní sliznice (po dobu cca 15 sekund)

Nakládání se vzorkem

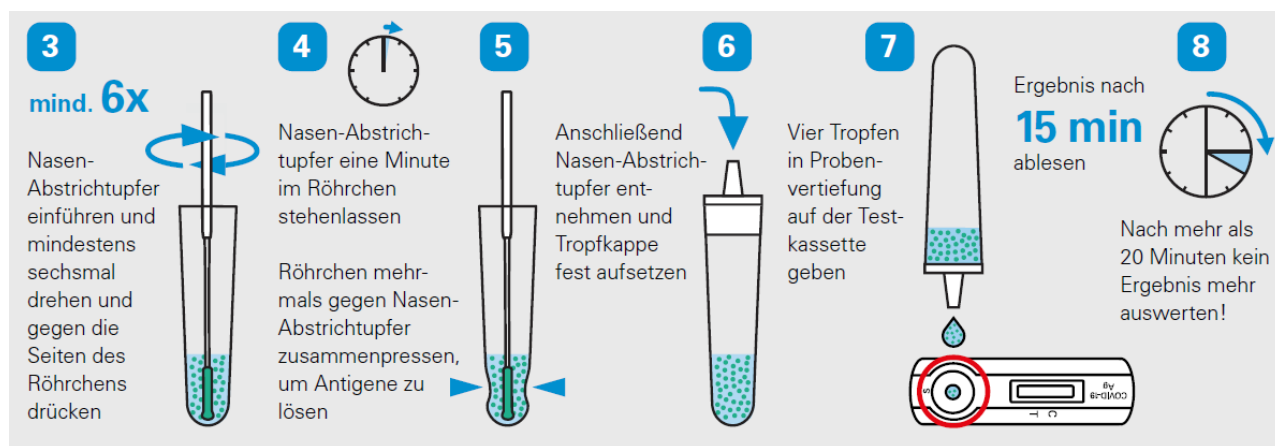

3

Tyčinku s tampónem vsuňte do zkumavky a minimálně 6x otáčejte a přitom přitlačujte tyčinku k stěnám zkumavky

4

Tyčinku s tampónem ponechte nastojato po dobu jedné minuty ve zkumavce

5

Stěny zkumavky stiskněte vícekrát k tyčince, aby se uvolnily antigeny

6

Poté za neustálého výrazného tlaku přes stěny zkumavky na tyčinku tuto vytáhněte a nasadte pevně uzávěr s kapátkem

7


Nakapejte čtyři kapky do testovací jamky v destičce na vyhodnocení testu

8


Po uplynutí **15 minut** odečtete výsledek testu

Po více než 20 minutách výsledek testu již nevyhodnocujte!

Vyhodnocení výsledků

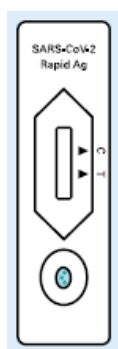

Každé zbarvení na výši testovací rysky (T) je nutno považovat za pozitivní

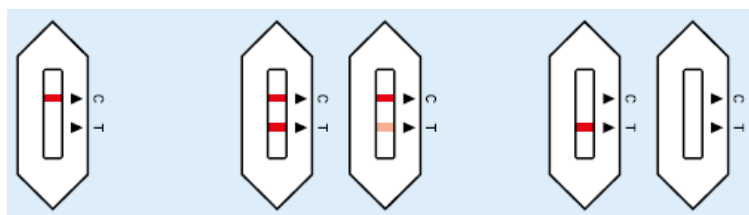

Negativní	Pozitivní	Neplatný/Nejasný	Použité soupravy
Zabarvení/čárka na kontrolní rysce (C)	Zabarvení/čárka na kontrolní rysce (C) a na testovací rysce (T)	Žádné zabarvení na kontrolní rysce (C)	vyhodit dobře zabalené do domácího odpadu
Žáci/žákyně se mohou zúčastnit výuky ve škole	Žáci/žákyně budou izolováni a musí být ve škole vyzvednuti resp. budou posláni domů; nutno vyrozumět místně příslušnou hygienickou stanici a nechat provést ověření výsledku pomocí PCR-testu	Test zopakovat s novou sadou	

Odpovědi na „nejčastější otázky“ (FAQ)

Co jsou rychlotesty na koronavirus pro vlastní použití?

Takzvané antigenní rychlotesty jsou rychle a snadno použitelné (viz stručný návod k použití rychlotestu pro vlastní použití). Vzorek se odebírá výtěrovou tyčinkou s tampónem, která se zavede cca 2-4 cm hluboko do každé nosní dírky. Již po 15 minutách je znám výsledek testu.

Jak se zachovat při „pozitivním“ výsledku testu?

Ukáže-li rychlotest pro vlastní použití pozitivní výsledek, je nutno dotčenou žačku resp. dotčeného žáka od ostatních osob izolovat a – pokud možno – nechat ve škole vyzvednout rodiči nebo oprávněnou osobou anebo poslat domů. Rodiče musí poté neprodleně oznámit výsledek testu místně příslušné hygienické stanici. Neboť je ale též možné, že test ukázal „nesprávně pozitivní“ výsledek, nařídí místně příslušná hygienická stanice podrobit se PCR-testu, za účelem ověření daného výsledku testu. Teprve poté, co PCR-test opět ukázal pozitivní výsledek, je prokázána nákaza koronavirem SARS-CoV-2.

Proč je třeba dodržovat i přes negativní výsledek rychlotestu platná ochranná opatření proti koronaviru?

Rychlotesty pro vlastní použití jsou pouze jednou ze základních složek. Spolu s ostatními zavedenými ochrannými opatřeními napomáhá ke zvýšení bezpečnosti ve škole.

K tomu patří

- Dodržovat odstup
- Nosit ochranné prostředky dýchacích cest jako jsou obličejové masky
- Mýt si ruce
- Kýchat a kašlat do ohbí lokte
- Pravidelné větrání

Jak se rychlotesty pro vlastní použití uchovávají a jak se likvidují?

Testovací soupravy by se měly uchovávat při teplotách v rozmezí 2–30°C, v žádném případě by neměly být uchovávány v mrazáku. Použité testy je možno vyhodit dobře zabalené v pevném a nepropustném plastickém sáčku na odpadky do smíšeného domácího odpadu.

V případě příznaků typických pro koronavirus: Rychlotest i v tomto případě provést?

Ne. V případě konkrétního podezření na nákazu koronavirem se postižené osoby musí obrátit na všeobecného lékaře nebo na příslušnou hygienickou stanici. Návštěva školy není povolena.

Hygienická stanice a dodatečný PCR-test

Pozitivní výsledek testu je nutno neprodleně oznámit hygienické stanici příslušné podle místa bydliště. Ta poskytne též další informace k ověření výsledku rychlotestu pomocí PCR-testu.

Přehled příslušných [hygienických stanic](#) najdete zde:



<https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/>

Další informace k rychlotestu na koronavirus

- [Demonstrační video](#)
- [Návod k použití v různých cizích řečích](#)
- [Další „Nejčastěji pokládané otázky“ \(FAQ\) a odpovědi](#)



<https://www.km.bayern.de/selbsttests>



<https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq>